

Pt

Microcut Manual é indicado para remoção dos excessos nas faces interproximais. **Uso:** Movimentar a serra longitudinalmente dentro do espaço interproximal, aplicando força contra o excesso a ser eliminado. **Advertências, precauções e restrições:** Uso profissional. Uso único. Sua reutilização por causar contaminação cruzada. O contato das lâminas com a gengiva pode causar danos ao paciente. É recomendável a proteção da papila, por exemplo com uma cunha, ou qualquer método de proteção, para evitar acidentes. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos. **Composição:** Aço inoxidável. **Armazenamento:** Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Ref.	Código	Conteúdo/ Contenido
0.3033	0005000003	Microcut Manual - 1 un. c/ 6mmx150mm
0.3034	0005000009	Microcut Manual - 10 un. c/ 6mmx150mm

Es

Microcut Manual es indicado para remoción de excesos en las regiones interproximales. **Uso:** Mover la sierra longitudinalmente dentro del espacio interproximal, aplicando fuerza contra el exceso a ser removido. **Advertencias, precauciones y restricciones:** Uso profesional. Uso único. Su reutilización puede causar la contaminación cruzada. Lo contacto de la sierra con la encía pueda causar daños. Es recomendable la protección de la papila, por ejemplo, con una cuña o cualquier otro método de protección, para prevenir accidentes. En caso de alergia comprobada del paciente a cualquiera de los componentes de este producto, el mismo no deberá ser utilizado. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente. **Composición:** Acero inoxidable. **Almacenamiento:** lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.

Versão/Version 09 - 04/2021

TDV Dental Ltda.
CNPJ 81.591.786/0001-60
XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000
Pomerode/SC – Brasil
Reg. ANVISA 10291220018
Resp. Técn.: Gisele Karina Gruber
CREA/SC 179557-7
☎ **55 47 3395-6115** | **0800 047 1020**
info@tdv.com.br | **www.tdv.com.br**
MD Dispositivo Médico  

